

براش Evalyn: جمع آوری نمونه در خانه آزمایش HPV

براش Evalyn


براش اوالین دستگاهی استریل است که به شما امکان می دهد نمونه برداری را در خانه انجام دهید. با استفاده از اوالین براش می توانید به راحتی و بدون درد مواد سلولی را از واژن جمع آوری کنید. این ماده بعداً در یک آزمایشگاه قابل تجزیه و تحلیل است.

- در دوران قاعدگی استفاده نشود.
- در دوران بارداری یا تا سه ماه پس از پایان بارداری استفاده نشود.
- یک بار مصرف است
- استفاده مجدد ممکن است منجر به عفونت یا تشخیص اشتباه شود.


دستور العمل استفاده از اوالین براش:




مرحله 1: قبل از استفاده دست های خود را بشویید

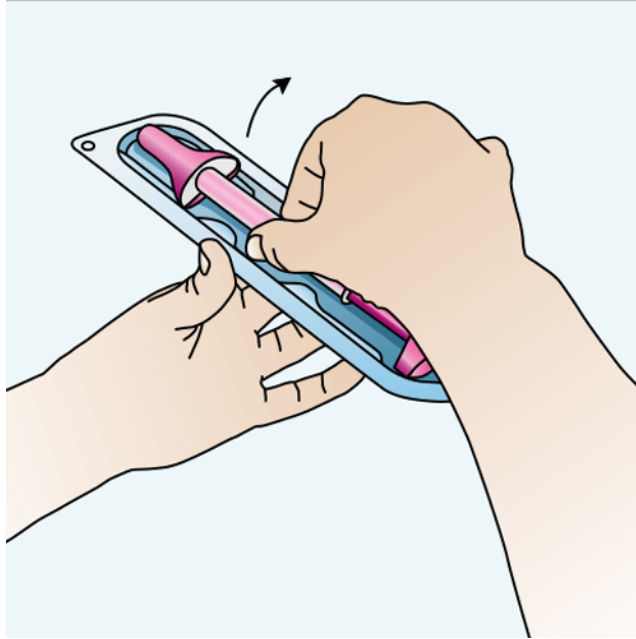


مرحله 2: برآش را از بسته بندی خارج کنید. بسته بندی را دور نیندازید زیرا برای ارسال به آزمایشگاه پس از استفاده به آن نیاز دارید.

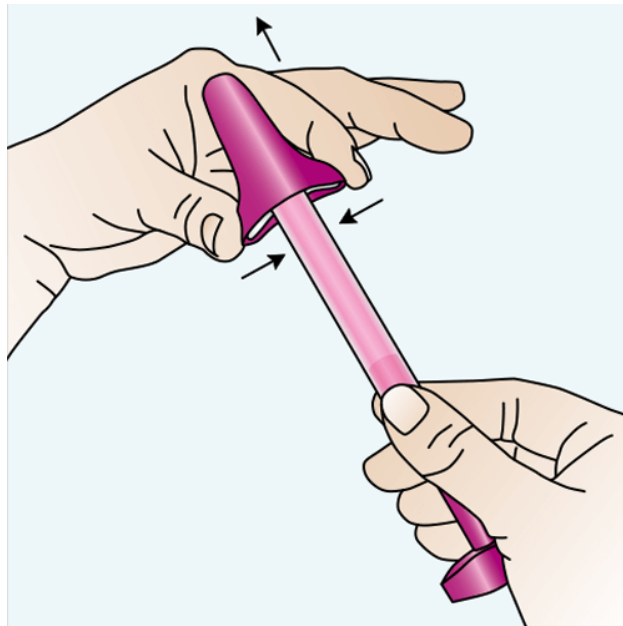


مرحله 3: دو طرف کلاه صورتی را با انگشت شست و اشاره فشار دهید تا آن را خارج کنید. به یاد داشته باشید که موهای سفید برآش را با دستان خود لمس نکنید!

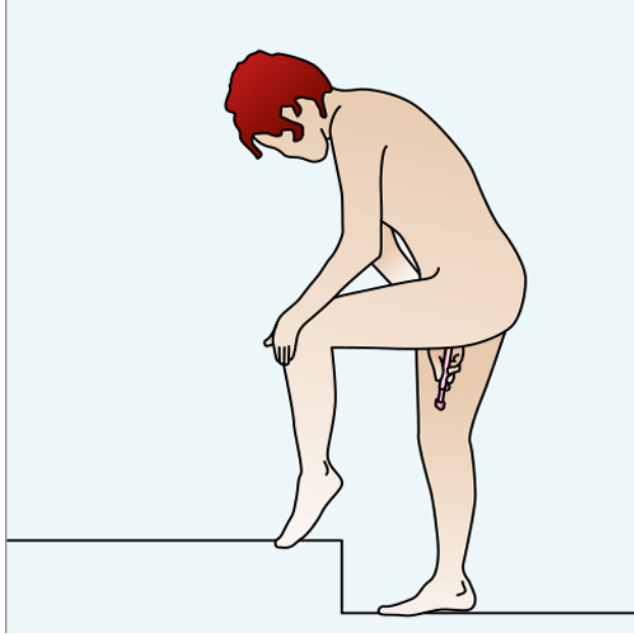


مرحله 4: نمونه را در حالت ایستاده جمع آوری کنید.

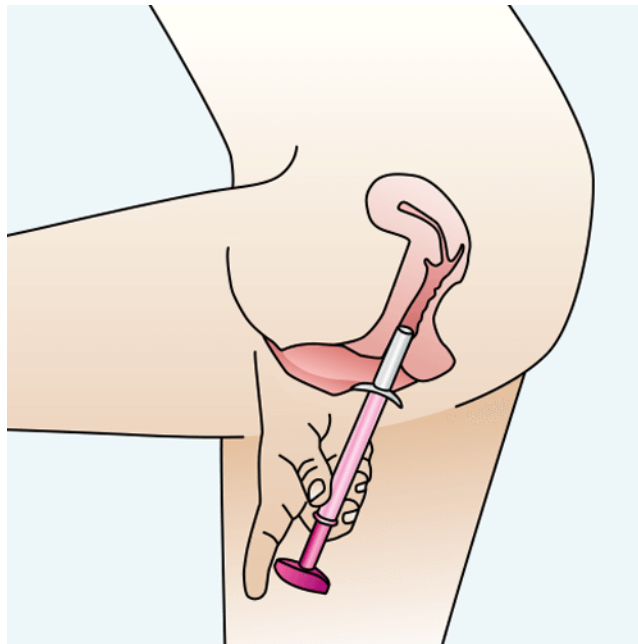


مرحله 5: لب های واژن خود را با یک دست باز کنید و با دست دیگر برآش را در واژن خود قرار دهید تا زمانی که بال ها با لابیای شما تماس پیدا کنند.

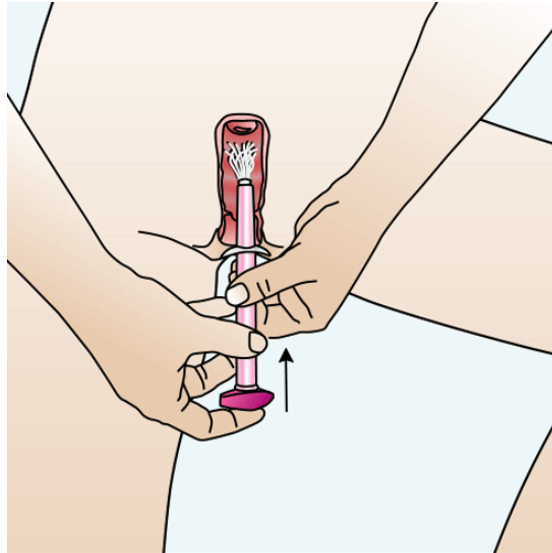


مرحله 6: محفظه شفاف را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر دستگیره صورتی را به سمت محفظه شفاف فشار دهید. هنگامی که برآش در موقعیت صحیح قرار گیرد و دسته صورتی در کنار محفظه قرار گیرد، صدای کلیک را می شنوید و احساس می کنید.

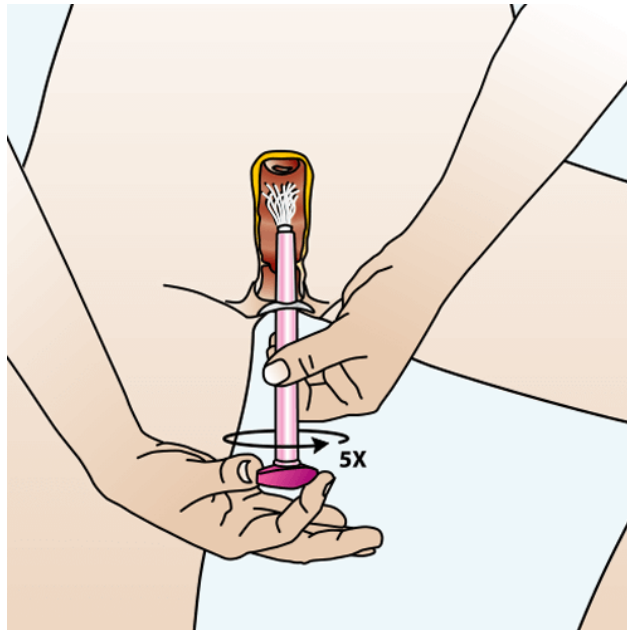


مرحله 7: دسته صورتی را پنج دور در یک جهت بچرخانید. بعد از هر چرخش یک کلیک خواهید شنید. پس از پنج بار چرخاندن دسته، برآش را با دقت بردارید.

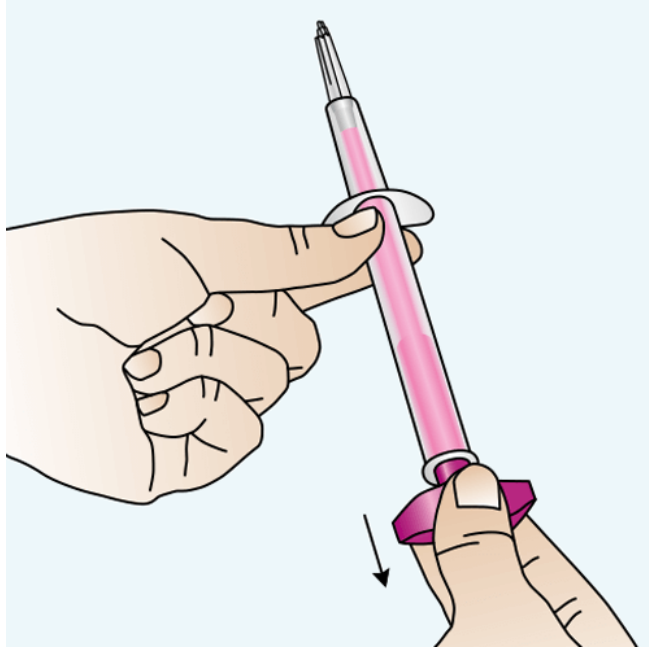


مرحله 8: محفظه شفاف را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر دستگیره صورتی را بکشید تا برآش سفید به داخل قاب جمع شود.

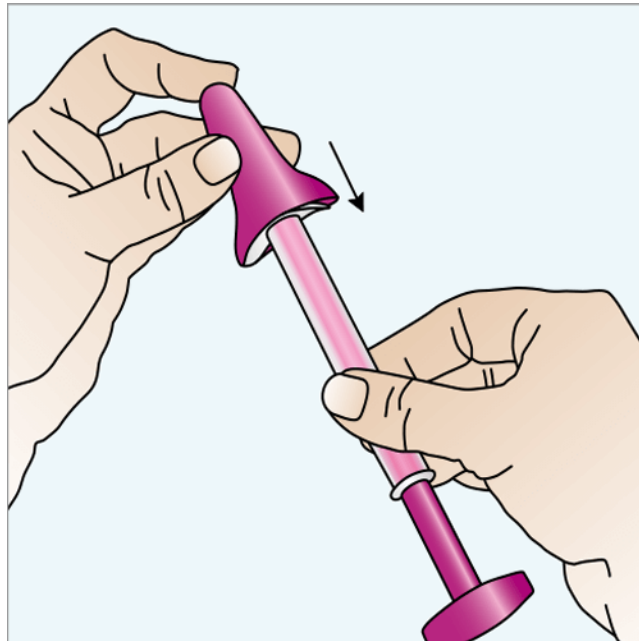


مرحله 9: انتهای شفاف را نگه دارید تا برس سفید دوباره بیرون نیاید. کلاه صورتی را با استفاده از انگشت شست و سبابه خود بر روی برآش قرار دهید. پس از نصب صحیح، صدای کلیک را می شنوید.

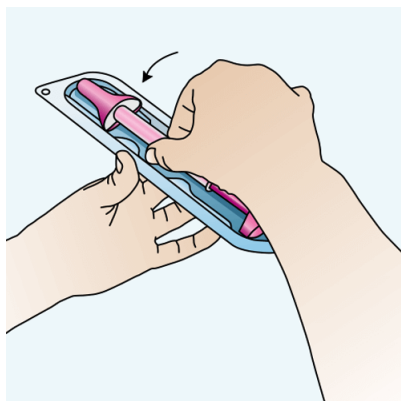

مرحله 10: براش را دوباره در بسته بندی آن قرار دهید.

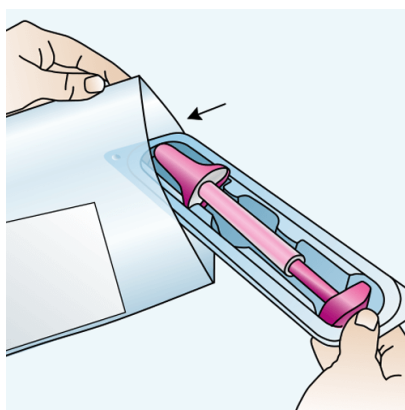

مرحله 11: بسته براش را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و کیسه را ببندید.

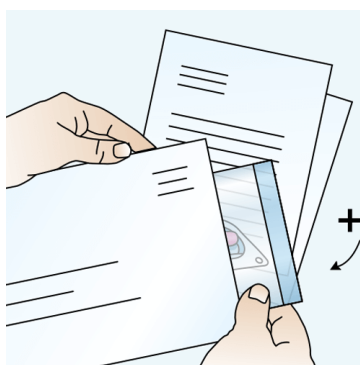

مرحله 12: از یک پاکت برای ارسال کیسه حاوی براش به یک آزمایشگاه استفاده کنید.